

ClearLight IPL

ЧТО ТАКОЕ CLEARLIGHT IPL?

Комплекс дерматологического лечения, фотоомоложения и эпиляции ClearLight – это уникальная многофункциональная система с IPL-технологией, включающая в себя 6 светофильтров, благодаря которым можно проводить такие процедуры, как:

- ✓ Фотоэпиляция волос
- ✓ Термолифтинг кожи
- ✓ Стимуляция выработки коллагена
- ✓ Лечение сосудистых патологий
- ✓ Лечение купероза и розацеа
- ✓ Удаление пигментации и веснушек
- ✓ Регуляция работы сальных желёз
- ✓ Лечение акне и постакне на лице и теле
- ✓ Лечение мелазмы

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ CLEARLIGHT IPL

Clearlight IPL — новейшая безболезненная технология фотоомоложения с видимым результатом сразу после процедуры.

Решает множество запросов пациентов: лечение пигментации, акне, постакне, купероза, розацеа. Улучшает качество кожи, осветляет, тонирует, выравнивает текстуру кожи, а также удаляет волосы на лице и на теле.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ФОТООМОЛОЖЕНИЯ НА АППАРАТЕ CLEARLIGHT IPL?

Фототерапия IPL – это безболезненная и эффективная методика, в процессе которой устраняются такие изменения и дефекты кожи, как пигментные пятна, сосудистые звездочки, расширенные капилляры, потеря эластичности, утончение и сухость.

Принцип процедуры состоит во влиянии на кожу импульсным светом с высокой интенсивностью.

Впечатляющий результат вы заметите после первой же процедуры.

Для максимального эффекта рекомендуется пройти 3-5 сеансов фотоомоложения, с промежутками в 2-3 недели.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ CLEARLIGHT

- ✓ Термолифтинг кожи
- ✓ Фотоэпиляция волос
- ✓ Лечение сосудистых патологий
- ✓ Удаление пигментации и веснушек
- ✓ Регуляция работы сальных желёз
- ✓ Лечение купероза и розацеа
- ✓ Уплотнение текстуры кожи
- ✓ Лечение акне и постакне на лице и теле
- ✓ Стимуляция выработки коллагена
- ✓ Лечение мелазмы

ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ПРОЦЕДУРУ ФОТООМОЛОЖЕНИЯ CLEARLIGHT?

Новейшая технология фотоомоложения ClearLight IPL уже завоевала любовь множества пациентов косметологических клиник и салонов красоты по всему миру.

Причины выбора ClearLight IPL более чем оправданы:

- Новый уровень охлаждения до - 20°C дает безопасность и комфорт пациентам, которые могут быть уверены в отсутствии риска ожогов и перегрева тканей.
- Быстрота самой процедуры и отсутствие реабилитации позволяет проходить лечение в любое время без отрыва от полноценной жизни.
- Положительный эффект виден сразу после 1й процедуры и раскрывается в течении 2х недель.
- Фотоомоложение может проводиться на нескольких зонах: лицо, шея, зона декольте, кисти рук.
- Возможность пройти курс в любое время года без ограничений.
- Разнообразные настройки аппарата позволяют работать со всеми типами кожи.

СТИМУЛЯЦИЯ ВЫРАБОТКИ КОЛЛАГЕНА

Одна из многих возможностей фотосистемы Clearlight — это работа с качеством кожи, ее плотностью и текстурой.

При взаимодействии со светом коллаген нагревается до температуры 40-45°C, приобретая упругую структуру и активируя процесс выработки новых волокон.

За счёт такой стимуляции пациент уже после первой процедуры видит эффект лифтинга, сужения пор и уплотнения тканей. А ускоренная регенерация кожи способствует улучшению цвета лица и появлению здорового сияния, как после отдыха.

В течение месяца после процедуры эффект начинает нарастать. Курс из 4-6 процедур позволяет достичь стойкого долговременного результата.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ФОТООМОЛОЖЕНИЯ НА АППАРАТЕ CLEARLIGHT

- ✓ Безопасность, неинвазивность (лечение без нарушения кожных покровов);
- ✓ Эффективность процедур для любого типа кожи;
- ✓ Гигиеничность, за счет бесконтактного воздействия;
- ✓ Широкий диапазон действия (любые возрастные проблемы кожи);
- ✓ Нет необходимости в длительном восстановлении после процедуры;
- ✓ Физиологичность, поскольку методика активизирует собственные ресурсы кожи;
- ✓ Накопительный эффект (результат сохраняется несколько лет, при этом процедуры помогают «обратить время вспять», кожа омолаживается естественным образом за счет производства собственного коллагена);
- ✓ Возможность сочетания с другими методиками омоложения и эстетической косметологии (пилинги, ботокс, диспорт, контурная пластика и т.п.).

УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ АППАРАТОМ CLEARLIGHT

Появление пигментации на коже говорит об увеличении количества меланина, которое может произойти как в поверхностном, так и в глубоком слое эпидермиса.

Избавиться от пигментации на лице и теле можно благодаря аппарату ClearLight IPL!

Аппарат Clearlight эффективно удаляет за одну процедуру от 30 до 70% любой пигментации на лице или теле (солнечной, посттравматической, пигментации после высыпаний).

Полное разрушение пигмента происходит во время процедуры, при которой на пораженные участки воздействуют импульсным широкополосным интенсивным светом без ультрафиолетового излучения. Энергия такого луча поглощается кожей, в результате чего происходит разрушение меланина, что соответственно избавляет кожные покровы от нежелательной пигментации.

Удаление пигментации может проходить в несколько этапов. Под воздействием тепла пигмент разрушается, темнеет и становится более выраженным. Постепенно он поднимается на поверхность кожи и самостоятельно отшелушивается в течение недели, а зона, прошедшая обработку, светлеет на 15-20%.

От веснушек, которые появились в поверхностном слое за летний сезон, IPL- терапия может избавить за 1-2 сеанса.

Если пигмент глубже, потребуется больше процедур. Интервал между сеансами составляет 3-4 недели.

ЛЕЧЕНИЕ РОЗАЦЕА, КУПЕРОЗА И СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ НА АППАРАТЕ CLEARLIGHT

Аппаратная IPL-фототерапия ClearLight позволяет избавиться от таких сосудистых патологий, как розацеа, купероз, «звездочки», «сетки» и т.п.

Благодаря уникальной технологии в процессе лечения происходит коагуляция сосудов, что позволяет полностью очистить кожу от всех нежелательных эстетических недостатков.

Самое приятное в этом то, что результат вы видите сразу же после первой процедуры!

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ И ПОСТАКНЕ НА АППАРАТЕ CLEARLIGHT.

IPL-фототерапия ClearLight - один из наиболее эффективных и щадящих методов лечения акне, угрей, воспалений, гнойников и последствий всех этих проблем.

Высокоинтенсивный импульсный широкополосный свет воздействует на патогенную микрофлору кожи, которая вызывает воспалительный процесс.

В результате восстанавливается защитная функция кожи, что приводит к ее очищению, сужению пор, нормализации работы сальных желез и удалению пятен после угрей/акне.

Лечение проводится курсом от 4х процедур с повторением 1 раз в неделю.

Уже после первой процедуры снижается количество воспалительных элементов, происходит осветление следов постакне, сужение пор и уменьшение количества комедонов.